

LA NUOVA RADIOFREQUENZA FRAZIONATA

Imperium Matrix


nuovo sistema a **radiofrequenza frazionata** per un trattamento non invasivo, **l'alternativa al lifting viso.**

Imperium Matrix è un marchio esclusivo della Brera Medical Technologies.

L'azienda è riconosciuta leader in tutto il mondo nel campo dell'estetica medica e fisioterapia.

Dopo tre generazioni e 30 anni di know-how, Brera unisce ancora tradizionale creatività italiana e l'intuizione con tecnologie avanzate per soddisfare le esigenze delle persone nel campo della bellezza e della medicina.

"Possiamo davvero vantarci di essere tra le poche aziende del settore a ideare, sviluppare e produrre interamente i nostri dispositivi."

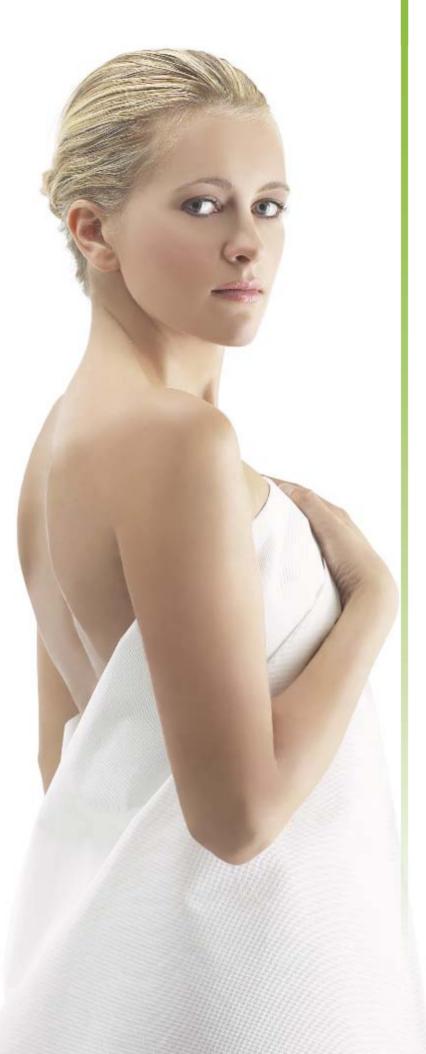

TRATTAMENTI NON INVASIVI

Convinti che ogni cliente meriti di beneficiare di ciò che c'è di meglio al mondo: trattamenti **non invasivi** che siano piacevoli e soprattutto sicuri, così come il raggiungimento di risultati soddisfacenti e duraturi nel modo più rapido possibile.

Un pilastro fondamentale di Brera è l'attività di ricerca, effettuata da un team interno in stretta collaborazione con Università e istituti privati. Sviluppo e innovazione indirizzano la ricerca sempre più verso esigenze specifiche e nel pieno rispetto della massima soddisfazione dei propri clienti.

La grande opportunità di raggiungere tale obiettivi è il nuovissimo dispositivo I**mperium MATRIX,** la più avanzata stazione di lavoro che ha dato una spinta al settore in cui il reale livello tecnologico e delle conoscenze (e l'innovazione) è ancora scarsa ed usuale.

- No Downtime.
- Risultati visibili immediati
- Assenza di sanguinamento
- Risultati duraturi
- Assenza di dolore

La combinazione di 3 forme di energie per risultati incredibili contro:

- Microrugosità
- Esiti cicatriziali post acne
- Rughe medie, moderate
- Pori dilatati
- Lassità cutanea

diatermologie°

TERAPIA IMPERIUM

IMPERIUM MATRIX promuove un intenso riscaldamento tissutale endogeno.

Non la classica tecnologia RF ma una Media Frequenza Amplificata (AMF), in associazione all'esclusiva geometria e composizione degli attuatori, che assicura nei tessuti umani un Flusso Energetico di Alta Qualità (HQF). I trattamenti devono essere effettuati da personale specializzato, dando la possibilità di offrire al centro Tecnologie di ultima generazione per il trattamento Frazionato del Derma Papillare.

L'Innovazione

IMPERIUM FPC (Fractional Pulsed Crown)

Il nuovo manipolo FPC aghi frazionato, con 225 micro-aghi su una superficie quadrata di 1,2 x 1,2 cm. Il manipolo è studiato per effettuare il trattamento con aghi a pressione controllata (attraverso un esclusivo sistema di ammortizzazione). Esso permette di creare micro fori a varie profondità, in modo omogeneo, riducendo il dolore e annullando ogni possibilità di sanguinamento.



Brevetto n.: 0000 281819



Il manipolo FPC Papillary agisce contemporaneamente sull'epidermide e sul derma senza effetti collaterali e senza lunghi tempi di recupero post trattamento.



NO a Bruciature, Sanguinamento, Anestesia locale e Dolore!



Volumizzazione – Effetto filler naturale Effetto Lifting non chirurgico Riduzione delle rughe


IMPERIUM FPC

confronto tra le tecniche più comuni

Terapia Imperium

L'emettitore **FPC** di **Imperium RF Matrix** è dotato di testine intercambiabili e disinfettabili con 225 micro-aghi ammortizzati, in grado di seguire qualsiasi profilo del viso ed il contorno occhi.

Le testine FPC innescano reazioni rigenerative nei tessuti di sostegno, determinando un rimodellamento delle fibre collagene con aumento della loro forza tensile e stimolazione della fase proliferativa. Questo processo coinvolge gli strati più profondi del derma in modo sicuro preservando lo strato superficiale. I tessuti vengono rigenerati in maniera del tutto naturale con un immediato ritorno alla vita sociale.

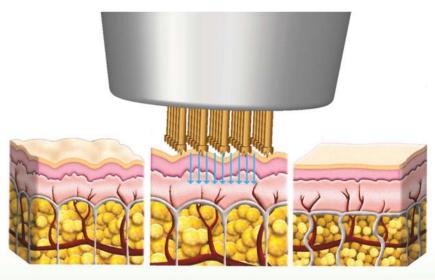

Prima del Trattamento

Terapia Imperium RF Matrix Manipolo FPC Papillary

Dopo il Trattamento

La **terapia è indolore e priva di effetti collaterali**, non prevede anestesia e tempi di convalescenza. I **risultati sono visibili da subito** e si evidenziano nelle settimane e nei mesi successivi.



Micro-needling RF

Questa tecnica, se pur molto comune, non consente tuttavia la regolazione della frequenza degli aghi in base alla resistenza della cute. Essa opera di conseguenza con perforazioni irregolari e disuguali. Il risultato non è dunque sempre omogeneo.

Il micro-needling è caratterizzato generalmente da una testina dotata di un numero inferiore di aghi che permette di operare su un'area limitata della superficie cutanea.

Alcuni moduli, inoltre, non includono una guida e gli aghi possono subire deviazioni laterali o perfino posizionarsi obliquamente durante il trattamento, causando in questo modo traumi cutanei. Spesso si usano aghi troppo lunghi per il viso provocando perforazioni nel derma, e conseguente effetto di sanguinamento.

La maggior parte delle tecniche di micro-needling impiegano anestesia locale per diminuire la sensazione di dolore, ma questo non elimina lo spiacevole effetto di sanguinamento.

Non sempre adatto all'uso sul contorno occhi.



Roller ad aghi

Questa tecnica prevede l'uso di un cilindro con molteplici aghi che viene passato manualmente sulla pelle. Gli aghi operano piccole perforazioni sulla pelle, stimolando il meccanismo naturale di autoriparazione.

Tale trattamento manuale non consente di controllare la profondità di azione degli aghi. Una pressione maggiore o eccessiva comporta profonde perforazioni, dolore e possibili lesioni cicatriziali sottocutanee

Una pressione troppo leggera provoca perforazioni mesi prima di avere dei risultati soddisfacenti. superficiali che non hanno alcun effetto. Prima del trattamento è spesso necessario an

Questa tecnica non prevede l'uso combinato con RF, quindi è solo un approccio di tipo meccanico.



Laser frazionato

Il laser frazionato crea minuscole zone, tipo pixel, nella profondità del derma, che spingono via la pelle vecchia danneggiata. Ogni trattamento sostituisce circa il circa il 15-20% della pelle danneg giata dal sole, invecchiata o disidratata. Questo innesca un naturale processo di guarigione del corpo accelerando la produzione di collagene e producendo nuove cellule sane.

I risultati dipendono anche dal tipo di problema della pelle. Se il trattamento prevede dei cicli ripetuti è necessario aspettare la fine del ciclo, anche 5 mesi prima di avere dei risultati soddisfacenti.

Prima del trattamento è spesso necessario anestesia locale con apposite creme da applicare almeno 1 ora prima del trattamento al fine di ridurre il dolore. A volte è necessario anche l'applicazione di un collirio anestetizzante per l'inserimento di una lente a contatto per proteggere gli occhi. Nelle prime 24 ore dopo il trattamento la pelle può risultare indolenzita. Non è consigliato quando si è sottoposti a cure farmacologiche con farmaci fotosensibili, anticoagualnti e durante la gravidanza.

RF **ENDOLIFT**


Questo dispositivo, unico nel suo genere, emette radiofrequenza bipolare combinata con contrazione passiva dei muscoli di sostegno. Questa tecnica, definita DIATERMOCONTRAZIONE®, permette, oltre agli effetti tipici della radiofrequenza sui tessuti (biostimolazione di collagene ed elastina), di migliorare il tono muscolare e promuovere un marcato effetto "lifting" del viso. Questa stimolazione è sufficiente per ottenere un'amplificazione di tutte le azioni proprie della termoterapia endogena (vasodilatazione, effetto analgesico, ossigenazione tessutale, ecc.), che sullo strato muscolare si manifesta con una piacevole contrazione massimale e completa in modalità atermica (senza calore percepito) o in modalità termica (calore sincrono alla contrazione).

RF Bipolar utilizzato per:


- Biostimolazione del viso, collo, decolletè
- Biostimolazione di attività dei fibroblasti, collagene (III) ed elastina
- Biostimolazione di acido ialuronico
- Ossigenazione dei tessuti
- Vascolarizzazione profonda

L'effetto termico della diatermia, opportunamente modulata con impulsi di potenza specifica, ha la capacità - attraverso l'azione di eccitazione e stimolazione del tessuto muscolare – di produrre una contrazione muscolare massima.

Questo rende **Imperium RF Matrix** un dispositivo unico, allargandone i campi di impiego e iducendo notevolmente i tempi di applicazione rispetto alle apparecchiature tradizionali, facilitando di gran lunga le modalità di applicative grazie anche ad una serie di attuatori di tecnologia avanzata.

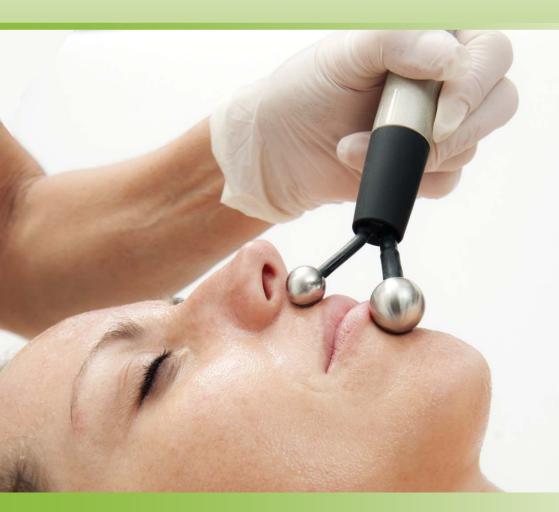


*Brevetto n.: 0000275485

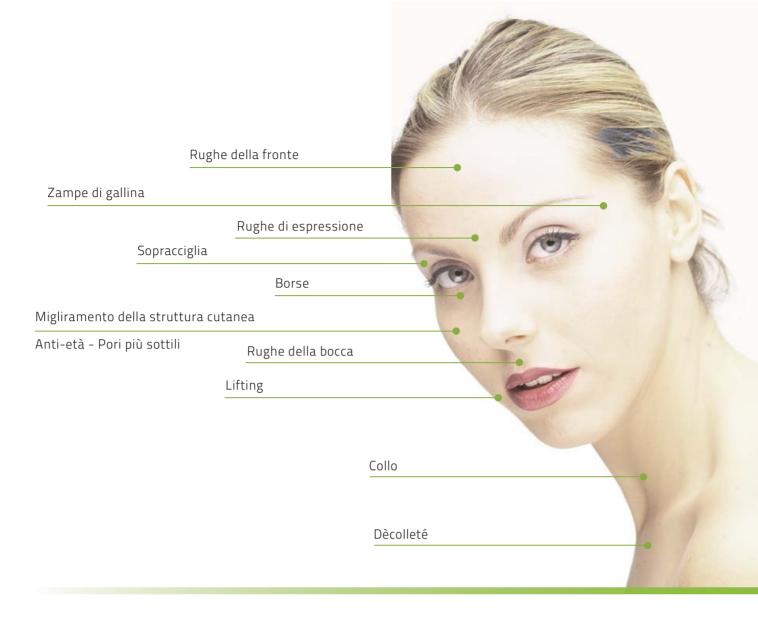





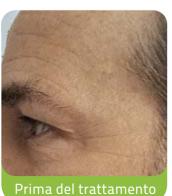



TRATTAMENTI

Imperium RF Matrix è un nuovo sistema a radiofrequenza frazionata, a configurazione bipolare e ad effetto tridimensionale.

L'esclusivo applicatore, di cui è dotato, crea 225 microfori nell'epidermide, inducendo una simultanea denaturazione del collagene del derma dovuta all'emissione di radiofrequenza pulsata.

La stimolazione termica del derma profondo, unitamente all'insulto meccanico della perforazione, crea una fittissima matrice di danno reticolare a diverse profondità (3d) che, porta ad un potente rimodellamento del collagene e a tutta una serie di benefici e vantaggi.

Prima del trattamento











BENEFICI E VANTAGGI

- .Reale ringiovanimento della cute
- .Attenuazione delle rughe profonde
- .Formazione di nuovo collagene
- .Rassodamento e rimodellamento del derma
- .Trattamento indolore senza anestesia
- .Rapido tempo di recupero dopo la seduta
- .Assenza di un effetto sulla melanina che rende la metodica sicura nei fototipi scuri e sui bersagli chiari
- .Efficace già dalle prime due sessioni.
- .Poche sedute (4-5) distanziate di 3/4 settimane per risultati duraturi nel tempo.

Valutazioni condotte a 7 giorni dal trattamento mostrano assenza di infiltrato infiammatorio o di necrosi tissutale.

Valutazioni condotte a 4 mesi hanno evidenziato un aumento della densità del collagene e un marcato effetto di skin tightening.

Il processo coinvolge gli strati profondi del derma, lasciando inalterati quelli superficiali.

I tessuti vengono rigenerati in maniera del tutto naturale ed indolore, con un immediato ritorno alla vita sociale.

- COSTI + GUADAGNI



Con Imperium, potrete offrire ai vostri pazienti/clienti un servizio esclusivo per il miglioramento e il ringiovanimento del derma. La terapia Imperium risponde alle innumerevoli aspettative dei vostri clienti.

Il numero di trattamenti può variare, secondo le specifiche condizioni. Un ciclo tipico richiede 4-5 trattamenti in totale: 3 trattamenti intervallati di 2 settimane l'uno dall'altro, seguiti da altri 1-2 trattamenti ogni 3 settimane. Un trattamento di mantenimento può essere pianificato approssimativamente ogni 3 mesi, secondo i bisogni e la risposta individuale.

Grazie ad incredibili risultati dalle prime sedute, potrete offrire facilmente il prodotto nel vostro studio con bassi costi di gestione e breve durata delle sedute, rientrando rapidamente nell'investimento.


PERCHÈ SCEGLIERE IMPERIUM RF MATRIX:

- Facile da utilizzare
- Basso costo di gestione e rapido rientro nell'investimento
- Complementare all'utilizzo della tossina botulinica
- Inserirsi in un interessante mercato in piena crescita
- Trattamenti unici e innovativi per i vostri clienti
- Risultati incredibili e clienti soddisfatti
- Formazione/Manualistica di qualità
- Strumenti e prodotti sicuri e certificati



MANIPOLI LA COMBINAZIONE DI TRE FUNZIONI

Tecnologia di ultima generazione per il trattamento Frazionato del Derma Papillare.

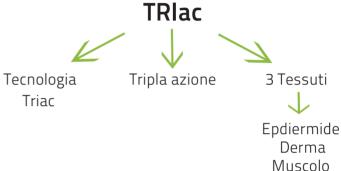

FPC (Fractional Pulsed Crown)

Innovativo manipolo aghi frazionato, con 225 micro-aghi su una superficie di 1,2x1,2 cm. Il manipolo è studiato per effettuare il trattamento con aghi a pressione controllata (attraverso un esclusivo sistema di ammortizzazione). Esso permette di creare micro fori a varie profondità, in modo omogeneo, riducendo il dolore e annullando ogni possibilità di sanguinamento.

Mesowave

L'emittitore implementa la tecnologia ad onde elastico modulate alta frequenza MHz per consentire la veicolazione di qualsiasi principio attivo (SONOFORESI). La penetrazione dei principi attivi è supportata dalla creazione di "micro canali" generati dall'azione meccanica del manipolo FPC e dall'aumento della permeabilità cutanea relativa all'azione ultrasonica.

RF Endolift

Il dispositivo, unico nel suo genere, emette radiofrequenza bipolare combinata con contrazione passiva dei muscoli di sostegno.

Questa tecnica, definita **DIATERMOCONTRAZIONE®**, consente, oltre agli effetti della radiofrequenza sui tessuti (biostimolazione di collagene ed elastina), di migliorare la tonicità muscolare promuovendo un marcato effetto "Lifting" del viso.

Imperium matrix



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	110- 220 V~ (± 10%)- 50/60 Hz
Consumi	300 VA
Classe di sicurezza	Classe I tipo BF, in accordo con i seguenti standard: DDM 93/42/CEE e succ. mod (Dispositivo di classe IIa) CEI EN 60601-1:2007 CEI EN 60601-2-5:2001
Dimensioni	45x35x15h cm.
Peso	7,5 Kg.
Fusibili	2 x T3.15A 5x20mm

RADIOFREQUENZA

Modalità RF	Bipolare
Frequenza	0,5 MHz
Potenza di uscita massima	. Fino a 120 W
Voltaggio in uscita	Fino a 75 Vrms

ULTRASUONI

Frequenza	1MHz
Modo operativo	Continuo (CW) o Pulsato (PW)
Max intensità in output	3W/cm2 in PW, 2W/cm2 in CW
ERA (Effective Radiating Area)	5 cm2
BNR (Beam Nonuniformity Ratio)	Max 6

 $La\,BMT\,S.r.I.\,si\,riserva\,il\,diritto\,di\,sostituire\,o\,apportare\,modifiche\,alle\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apportare\,modifiche\,alle\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apportare\,modifiche\,alle\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apportare\,modifiche\,alle\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apportare\,modifiche\,alle\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apportare\,modifiche\,alle\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli\,accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,agli accessori\,senza\,preavviso\,apparecchiature\,o\,apparecch$

IMPERIUM RF MATRIX

I trattamenti Imperium vengono eseguiti con il dispositivo Imperium RF Matrix, piattaforma innovativa per un uso nel campo della medicina estetica dotato di un nuovo incredibile manipolo frazionato ad aghi, un manipolo per veicolazione transdermica e un bipolare a Radiofrequenza per trattamenti lifting endogeni.

Imperium RF Matrix è prodotto in conformità alle norme europee **ISO9001 - EN 13485.**

Dispositivo medico CE 1370.



CONTATTACI SUBITO **0974 19.36.516**

info@breramedical.com

ABBIAMO PENSATO AL FUTURO DEL TUO CENTRO

DISTRIBUTORE



AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI CEI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008 Brevetti n. 0000281819 - 0000275485 - 0000270042 - 0000281819

l dati, le immagini e quant altro descritto non assumono valore contrattuale e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione.

Diatermologie®, Imperium ® e Brera® sono Marchi Registrati ed è vietata la riproduzione



